

Gebrauchsanweisung Smart Serviettenhalter

Artikelbezeichnung:	Smart Serviettenhalter
Art der Anwendung:	Serviettenhalter aus medizinischem Silikon zum Schutz der Patientenbekleidung, mit Edelstahl Krokodilsklemmen zum Befestigen von Servietten. Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.
Gebrauchsanweisung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entnehmen Sie den Serviettenhalter aus der Verpackung und autoklavieren Sie den Serviettenhalter bei Bedarf. 2. Legen Sie den Serviettenhalter in den Nacken des Patienten, die Krokodilsklemmen liegen auf der Brust des Patienten. 3. Drücken Sie auf die Krokodilsklemmen, um die Serviette zu befestigen.
Sterilisation	Nach dem Gebrauch muss der Serviettenhalter mit Wasser abgespült werden. Zur Sterilisation im Dampfsterilisator für 120 °C für 15 Minuten oder 135 °C für 5 Minuten autoklavieren.
Haltbarkeit	5 Jahre

Druckdatum: 12.02.2024